

FAQ

Algebra (Straight and contra angle)


Alegra弯机WE-56 T 和WE-56有什么区别？

带有"T"字母的Alegra弯机很轻。不带"T"的Alegra弯机带有自动热清洗消毒功能。

我应该在发送要维修的设备前电话联系维修站吗？

如果您不确定故障的原因，最好致电维修站并和技术人员沟通。与技术人员一起，能够确定需要发送的设备/部件，而且，有时候甚至能够立即解决问题。

W&H手机能够用热消毒机和灭菌器处理吗？

能够，只要W&H器械贴有相应的热消毒和灭菌符号且热消毒机具有干燥周期。（添加符号 ）

W&H手机能够用灭菌器处理吗？

能够，只要您的W&H手机标有相应的灭菌符号。 



为什么WE-99弯手机的传动比为1:4.5？

用WE-99能够轻易获得快速旋转车针的最佳转速。

直手机HE-43 E能用于口腔外科吗？

新型Alegra系列具有经试验和验证的如下临床范围：去除腐蚀材料、窝洞及牙冠粘固剂，去除填充物，牙齿和修复面的平整和抛光。用于其他临床目的，由用户承担一切责任，我们不建议用于其他临床目的。

LED器械能与发生器仪器灭菌吗？

能够。带LED和发生器的W&H手机均能灭菌处理和热消毒处理。  

其他新型Alegra器械能够接至带光源的马达？

能够，新型Alegra系列直弯手机能够用于任何ISO接口的马达。

新型Alegra器械的优势是什么？

LED照明兼容—新型Alegra系列器械提供LED照明，通过内置发生器供电。因此，器械独立于马达和牙科综合治疗机的光源，能够与任何牙科综合治疗机兼容而为治疗提供照明。集成发生器技术意味着器械运行即可获得照明。

LED不亮的原因是什么？

.因为新型Alegra器械的LED由集成发生器供电，LED的亮度取决于马达转速（9,000转/分以上）。

新型Alegra系列的LED器械可能过热吗？

不会，由于LED器械运行时一直伴有冷却空气，因此不会发生过热。此外，带LED器械都具有内部喷雾，为LED提供附加冷却。