

FAQ

Algebra (Turbine)

我有一把新型的Alegra LED高速手机，通过集成发电的ROTO快接提供能量。我想请问一下在使用带有集成发电的ROTO快接时需要注意些什么？

快接中的集成发电机是由滚珠轴承组成，必须每月注油润滑一次，用于去除污渍。

Alegra高速手机用于光学牙椅是否也有光？

Alegra LED 用于RQ-54 / RQ-53快接，不能用于RQ-24 / RQ-34快接。

我应该在发送要维修的设备前电话联系维修站吗？

如果您不确定故障的原因，最好致电维修站并和技术人员沟通。与技术人员一起，能够确定需要发送的设备/部件，而且，有时候甚至能够立即解决问题。


我怎么操作W&H新型按下拔出系统？我怎么卸下涡轮手机？

用左手握住涡轮手机。用右手握住靠近接头的手机导线。用右手的两根手指（拇指和食指）向后用力拔接头的保留套。涡轮手机即可容易地从接头上取下。拔涡轮手机的力太大可能会损坏手机。如需用较大的力卸下涡轮手机，请确保完全罩住接头的保留套。Synea涡轮手机使用说明书详细说明了这一点（链接50608）。

W&H涡轮手机能用灭菌器处理吗？

能够，只要您的W&H涡轮手机标有相应的灭菌符号。 

W&H涡轮手机能用热消毒机处理吗？

能够，只要您的W&H涡轮手机标有相应的热消毒符号，且热消毒机具有干燥周期。（增添符号） 

我刚购置一部W&H涡轮手机，我应该致电维修工程师咨询安装事宜？

是的，必须正确调整涡轮手机的气压/水压以及电压（适用的话）。

我有一部不带光纤的涡轮手机，怎么为涡轮手机提供照明功能？

如涡轮手机导线能提供电源，您需要正确的接头和一部带光纤的涡轮手机（例如：RQ-24、TA-97 LED）如果不能提供电源，最简单的方法是购买内置发生器和LED（发光二极管）的W&H Alegra LED G涡轮手机。牙科综合治疗机则不需另花一分钱。

哪种车针能够用于W&H涡轮手机？

小头部16mm~21mm（即所有标准车针长度）车针和标准头部19mm~25mm（即也适用特殊应用的车针）车针，最大切削直径2mm。除此之外，必须遵守车针制造商的规定。使用更长的旋转器械时，用户必须确保选择不会对用户、患者或第三者造成危险的正确工作条件。

旋转器械的最大长度是多少？

标准涡轮手机（XX-98型号）为25mm，小机头涡轮手机（XX-97型号）为21mm。使用更长的旋转器械时，用户必须确保选择不会对用户、患者或第三者造成危险的正确工作条件。

涡轮手机的功率/转速不足？

请检查牙科综合治疗机的驱动气压，以及器械的维护状况（RQ接口Synea = 3 +/- 0.3bar，Multiflex®接口2.5 - 4bar）。所有Alegra涡轮手机的气压须设为2.5 - 2.8bar。