

FAQ

Assistina 301 plus

正确使用Assistina 301 plus。

请仔细阅读用户手册关于第一次使用、日常使用和维修的内容。另外，您可以观看 Assistina 301 plus相关[视频教程](#)。

怎么检查确认Assistina工作正常？

检查/更换马达接头/适配器的O型圈。启动灭菌周期时，请确保持续按下“启动”按钮2秒以上。按下按钮时，右侧（清洁液）绿色功能指示灯点亮。保持按下按钮2秒后，左侧绿色指示灯点亮。详细的功能检查请查阅“每周检查清单”（链接50390）以及用户手册“测试”和“功能检查”章节（链接50458）。

Assistina正常运行需要多大的气压？

气压应在4~10bar（58~145psi）的范围内。

隔多长时间就应更换供气的过滤器？

每年更换一次或过滤器充满污渍（目视检查 - 过滤器应是白色的）。请观看过滤器更换视频。