

Troubleshooting

Elcomed

信息消息

管路不能安装到牙科综合治疗机上/哪种型号的牙科综合治疗机对应哪种类型的管路？

请查阅注水管路对照表或牙科综合治疗机的用户手册，检查管路是否正确。（链接50734）

怎么安装注水管？

请查阅用户手册“开始运行 - 通用”章节或观看视频，了解详细说明。（链接50731-AEN、Elco 50668、视频）

冷却水从手机漏出。

请确保使用的是正确类型的管路（请参见“管路对照”链接50734）。检查泵臂的注水管是否正确安装（没有扭曲）及是否损坏。请确保泵臂完全闭合。换上一根新的注水管，如仍漏水，请将器械送去维修。

马达/手机不旋转。

"如显示屏显示有“错误信息”，请在用户手册（链接50731-AEN、Elco 50668）中检索错误信息及对应的解决措施。如没有错误信息：1) 从马达上卸下手机后再试，如马达旋转，则手机堵住，需维修手机。2) 如卸下手机后马达不转，换备用马达试试。如备用马达工作正常，请将有故障的马达送去维修。3) 如备用马达也不工作，关闭控制主机，拔下脚动控制后检查导线和插头是否存在物理损坏（断线、破裂/插脚弯曲...）。4) 如导线和插头看起来正常，重新接上脚动控制，请确保插入正确；然后启动控制主机，踩下脚动控制并观察马达是否旋转。如以上步骤仍不能解决问题，我们建议您电话联系维修站。"

上电时，显示屏黑屏/偏暗。

请检查电源线、熔断器以及电源线是否插上（！）。如电源已接通，熔断器和电源线正常，则控制主机需送去维修。

无注水。

"检查注水泵是否运转（显示屏上液滴），以及是否听到泵运转的声音。从手机上卸下手机导线，启动马达/泵并观察是否有水从导线中流出（手机的供水管路可能堵塞）。如导线中没有水流出，打开泵臂并等几秒钟（冷却水应流出导线）。如导线中仍没有水流出，请仔细观察导线是否损坏或扭曲。如使用供水瓶，请确保阀门打开。如仍无注水，则导线堵塞，需更换导线。如泵臂打开时有水流出导线，但泵臂关闭且泵启动时无水流出，则仅需将控制主机和脚动控制送去维修。"

错误代码类型：



描述：

脚动控制无法识别。

措施/解决方案：

正确连接脚动控制。



描述：

脚动控制错误。

措施/解决方案：

连接一个正常工作的脚动控制或释放被踩下的脚动控制按钮。



描述：

马达无法识别。

措施/解决方案：

正确连接马达。



描述:

马达错误。

措施/解决方案:

连接一个正常工作的马达。



描述:

马达故障。

措施/解决方案:

连接一个正常工作的马达。



描述:

接通设备电源时，切换按钮或+/-按钮激活。

措施/解决方案:

释放被激活的按钮，关机后重启。



描述:

电子元件过热，安全关机。

措施/解决方案:

关机，等待设备冷却10分钟以上，然后重启。



描述:

电子元件过载。

措施/解决方案:

关机后重启。



描述:

请电话联系维修中心。

措施/解决方案:

关机后重启。如再显示错误信息，请联系W&H授权维修伙伴。