

FAQ

Piezomed

如何清洁？

a. 在超声波清洗液中做准备：

- 将设备放入设备托盘中，放低放入超声波清洗液中
- 使用适用于实心器械（探针，镜子，钳等）的清洁，杀菌剂。

不要用清洁车针的清洁剂，因为腐蚀性很强。

- 在超声波清洗液中清洗完后，用水将冷却通道里的残留清洁杀菌剂清洗擦拭干净。
- 擦拭完毕后，用压缩空气吹干。
- 在仪器托盘中更换干燥的仪器。包装好进行消毒

b. 在干净的容器中进行机械准备

- 使用清洁适配器 (请见使用说明 – 附件)
- 做好清洁杀菌后, 核查冷却通道是否干燥, 如有必要, 需用压缩空气再次吹干。

第三方设备能用于Piezomed上吗？

a. 不同纹理

b. Piezomed 检测系统不能用于检测第三方设备

设备检测系统能使用多久？

设备检测系统位于LED插座里。当在更换LED插座时，会自动被替换。

当你拧紧植入工具的时候，可以听见扭力驱动器发出声音吗？

是的，必须发出一次声音，否则扭力不够。

服务寿命有多长

LED?

LED保护层的颜色一旦退色，用户就需要替换LED插座，否则会影响照明。使用长短因不同的消毒器类型及消毒流程而长短不一。

仪器检测?

仪器检测位于LED插座内。一旦更换了插座，将同时自动被更换。

Piezomed是否能用于第三方仪器？

不可以

- a. 不同的切割
- b. 第三方设备不能找到正确的谐振点 – 仪器不能摆动

设备能使用多久？什么时候需要更换？

使用寿命取决于使用频率和消毒周期没有很大关系.

- a. 当出现以下情况时，需要更换设备
 - 使用设备时，功率出现损耗
 - 设备有明显的损坏或者柄出现问题.
- b. 如出现以下情况，必须更换锯片
 - 牙齿折断
 - 牙齿磨损
- c. 如出现以下情况，必须更换金刚石层面仪器
 - 金刚石层面受到磨损