

FAQ

Implantmed

我应该在发送要维修的设备前电话联系维修站吗？

如果您不确定故障的原因，最好致电维修站并和技术人员沟通。与技术人员一起，能够确定需要发送的设备/部件，而且，有时候甚至能够立即解决问题。

我怎么调节扭矩？

仅P4和P5可以调节扭矩。通过“+”或“-”按钮增加或降低扭矩。详细说明（工厂设置、调节范围等）见用户手册。（链接50731）

其他厂商的手机能够用于W&H外科马达（Implantmed / Elcomed）吗？

对于不需要精确扭矩的临床应用（钻削、磨削等），可以使用任何具有ISO 3964接口的手机。请注意：其他厂商的手机也许不能正确响应您的牙科综合治疗机/马达的扭矩，因此可能造成损坏。

能够使用其他品牌的涡轮手机吗？

不推荐。因规格（材料、尺寸）不同，可能造成泄漏、冷却不足等问题，甚至损坏设备。关于正确管路，请参阅“管路对照”（链接50734）或用户手册（使用说明50731、Elco 50668）。

如何安装注水管？

请查阅用户手册“开始运行-通用”章节或观看视频，了解详细说明。

装置/马达怎么进行清洁/灭菌？

请查阅用户手册“卫生和维护”章节，了解详细说明。

能够通过程序调节马达转速来插入种植体吗？

不能，转速设为15转/分、正向，30转/分、反向。只有扭矩可以调节。

为什么安放种植体时，“LED G”手机的照明不工作？

手机内的发生器需要300转/分以上的转速来产生点亮LED的充足电量。

Implantmed/Elcomed马达能够用热清洗消毒机处理吗？

能够，如热清洗消毒机具有干燥周期且马达贴有“可用热清洗机消毒”的符号（增加符号）

。

Implantmed/Elcomed马达能够盖上保护帽后用真空灭菌器处理吗？

不能。新型马达必须不盖保护帽才能进行灭菌处理。

W&H器械需要维护吗？

包括附件在内进行功能性和安全性的定期维护是必须的，且应至少三年维护一次，除非法律规定更短的维护间隔。详细说明请查阅用户手册“维护”章节。（链接50731，Elco 50668）

我的器械能够使用什么类型的管路？

关于正确管路，请查阅“管路对照”（链接50734）或用户手册（使用说明书50731、Elco 50668）。

马达必须注油润滑吗？

不是。马达轴承已注有使用寿命内需要的润滑油，任何注油润滑都会降低马达的使用寿命。