

Troubleshooting

Lina

警告消息

-

腔室门是锁着的；无需采取任何行动。

替换细菌过滤器

细菌过滤器需要更换。

替换灰尘过滤器

灰尘过滤器需要更换。

替换腔室门封条

腔室门封条需要更换。

推荐4000次循环后，保养一次

4000次循环后需要保养。请呼叫服务。

已运行20000次循环，请呼叫服务

20000次循环后需要保养。请呼叫服务。

警告！电量低

CPU板载电池需要更换。请呼叫服务。

Lock messages

警告！舱室过热

不要徒手触摸腔室或装载物：高温，有烫伤的危险！

Drop messages

加满水箱

净水箱内的水位低于最低水位。给干净的水箱加满水。

排出废水

所使用的水箱内的水位达到最大水平。请排水。

水质过差，请检查氧气供应

检查外部消毒器供水。您可能需要更换滤筒-排空干净的水箱，并遵循水过滤系统的使用说明。

水质不确定，请停止使用灭菌器

净水箱中的蒸馏水/除盐水质量差。排放水箱中的水，并重新注入优质水；参见附录7

水质过差，请停止使用灭菌器！

净水箱中的蒸馏水/除盐水质量差。排放水箱中的水，并重新注入优质水；参见附录7

Printer messages

PC连接失败，检查线缆/PC

未检测到PC/记录器（已断开连接或未通电）。

打印机未准备好

循环报告打印机已配置但未检测到（已断开连接或未通电）。

标签打印机未准备好

标签打印机已配置但未检测到（已断开连接或未通电）。

文件保存错误

文件保存错误（检查U盘是否插好和连接）。

错误代码类型：

E010

描述:

循环过程中动力失效

措施/解决方案:

装载不被认可为是无菌的。请重复循环。

E02x

描述:

内部电压错误

措施/解决方案:

关闭和打开灭菌器。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E040

描述:

电量低

措施/解决方案:

日期和时间丢失：重新设置-关闭和打开设备。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务合作商。注：手动设置日期和时间后，仍可以启动灭菌循环。

E041

描述:

循环计数器丢失

措施/解决方案:

关闭和打开灭菌器。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。注意：启动灭菌循环仍然是可能的。

E042

描述:

内部时钟错误

措施/解决方案:

设置日期和时间-关闭和打开灭菌器。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。注意：
：启动灭菌循环仍然是可能的。

E060

描述:

内部电压错误

措施/解决方案:

从24V直流电后插头上断开可选配件-关闭和打开灭菌器。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E080

描述:

内部过热

措施/解决方案:

检查滤尘器，确保灭菌器风扇没有堵塞。

E090

描述:

内部电压错误

措施/解决方案:

关闭和打开灭菌器。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E100

描述:

阶段超时

措施/解决方案:

检查干净水箱的水位。重置热过载。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E101

描述:

内部探针错误

措施/解决方案:

关闭和打开灭菌器。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E102

描述:

阶段超时

措施/解决方案:

检查干净水箱的水位。重置热过载。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E104

描述:

阶段超时

措施/解决方案:

检查干净水箱的水位。重置热过载。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E106

描述:

阶段超时

措施/解决方案:

检查干净水箱的水位。重置热过载。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E107

描述:

预真空阶段过压

措施/解决方案:

如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E121

描述:

内部探针错误

措施/解决方案:

关闭和打开灭菌器。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E130

描述:

灭菌阶段过压

措施/解决方案:

重复循环。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E131

描述:

灭菌阶段温度波动

措施/解决方案:

重复循环。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E140

描述:

灭菌阶段压力过低

措施/解决方案:

重复循环。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E150

描述:

灭菌阶段温度过低

措施/解决方案:

重复循环。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E160

描述:

灭菌阶段温度过高

措施/解决方案:

重复循环。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E163

描述:

检测到压力过大

措施/解决方案:

如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E180

描述:

内部探针错误

措施/解决方案:

关闭和打开灭菌器。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。

E181

描述:

内部探针错误

措施/解决方案:

关闭和打开灭菌器。如果问题仍然存在，请致电您的W&H服务商。