

Troubleshooting

Perfecta 300/600

信息消息

可旋转的工具不能完全插入筒夹。

请用原装工具清洗筒夹。启动工具包

错误代码类型：

E00

描述:

电子元件过热 – 安全关机

措施/解决方案:

关机，等待设备冷却10分钟以上，然后重启。

E01

描述:

马达手机过载 – 堵转

措施/解决方案:

连接马达手机或锁上夹头。

E07

描述:

脚踏式起动器初始化错误

措施/解决方案:

关机，重启，开机时切勿操作脚动或膝动控制。

E09

描述:

脚踏式起动器错误，转速调节器（脚动/膝动控制组件）错误

措施/解决方案:

关机，检查脚动控制的连接，重启。

E19

描述:

运行受限控制

措施/解决方案:

关机后重启。

E99

描述:

系统故障

措施/解决方案:

关机后重启。