

## FAQ

### Roto Quick 快插接口

#### 我应该在发送要维修的设备前电话联系维修站吗？

如果您不确定故障的原因，最好致电维修站并和技术人员沟通。与技术人员一起，能够确定需要发送的设备/部件，而且，有时候甚至能够立即解决问题。

#### 我怎么操作W&H新型按下拔出系统？我怎么卸下涡轮手机？

用左手握住涡轮手机。用右手握住靠近接头的手机导线。用右手的两根手指（拇指和食指）向后用力拔接头的保留套。涡轮手机即可容易地从接头上取下。拔涡轮手机的力太大可能会损坏手机。如需用较大的力卸下涡轮手机，请确保完全罩住接头的保留套。Synea涡轮手机使用说明书详细说明了这一点（链接50608）。

#### 为什么我需要6孔接口来运行LED涡轮手机？

需要用6孔接口为涡轮手机提供电源。其他接口不能提供电源。

#### W&H接头能够进行热消毒和灭菌处理吗？

不能，禁止接头进行热消毒处理；用蒸汽灭菌器，可进行不超过135°C温度的灭菌处理。热空气灭菌和（或）冷灭菌（放置在液体中）未经验证。

#### 能够用于旧型号Roto Quick接头（924等）的所有器械也可以接至新型号RQ-24吗？

能够，现有型号和新型号器械都能够用于旧型号和新型号的接头。

#### 除Roto Quick接头外，有其他接头吗？

有。W&H提供的“RM-34 LED”为Multiflex®接口。