

Troubleshooting

Synea



信息消息

FG型车针夹持不良（使用时打滑）。

用车针规（REF 02139800）检查车针，并确保车针插入到底。如果车针没有任何问题，请将手机和车针送去维修。

不能卸下车针/驱动器（粘住）。

对涡轮手机注油，然后在直接拔下车针时按压实体表面上的后盖。如仍不能卸下，器械需送去维修。

冷却喷雾工作不正常。

检查水压：0.7~2bar。检查喷气压：1.5-3bar（喷气压须高于水压）。接头也需检查（密封件、O型圈、是否正确旋入？）。

无喷雾。

首先检查牙科综合治疗机上的冷却水开关和调节器。从RQ快接头上卸下涡轮手机，然后踩下脚动控制。如果RQ接头有水流出，则涡轮手机堵塞或RQ顶端的O型圈遗落或磨损。如RQ接头没有水流出，请卸下RQ接头并检查是否有水从管路中流出。如有，则RQ接头堵塞；如无，请致电牙科综合治疗机维修工程师。堵塞的涡轮手机或RQ接头应送去维修。

不带光

与不同的/其他高速手机连接，看一下有没有光。如果没有，请看一下位于触摸板的光源开关有没有开，或者看一下光强度调节器（如果有的话）是否调制到最大。在灯开着的状况下，电压电源应该是V DC/AC 3,2 ± 0,1. 核查一下高速手机的所有连接管路及适配器是否有损坏，如果有，该高速手机需要检修。

没有供电。

检查RQ快接头是否牢固地装在管路上。换上另一支不同的涡轮手机并检查是否工作正常。如工作正常，请将有故障的涡轮手机送去维修站维修。

注油时机头流出黑色的清洗润滑油。

这就是注油润滑的“清洁效应”。擦去黑色的润滑油，重复注油至清洁/干净的润滑油流出。