

Troubleshooting

Tigon+

信息消息

上电时，显示屏黑屏/偏暗。

请检查电源线、熔断器以及电源线是否插上（！）。如电源已接通，熔断器和电源线正常，则控制主机需送去维修。

错误代码类型：



描述:

脚动控制无法识别。

措施/解决方案:

> 正确连接脚动控制 > 连接正确的脚动控制



描述:

脚动控制故障。

措施/解决方案:

> 正确连接脚动控制 > 连接正确的脚动控制



描述:

信息：识别出脚动控制

措施/解决方案:



描述:

上电时按下按钮 (键盘) 。

措施/解决方案:

> 释放键盘上被按下的按钮 。



描述:

错误的电子元件温度 。

措施/解决方案:

> 关机 · 等待冷却 > 应遵守容许的环境的温度 > 应遵守操作模式



描述:

手机无法识别 。

措施/解决方案:

> 正确连接手机 > 检查LED座 (是否正确安装? 是否有故障?) > 检查手机接头 > 检查供应管线



描述:

手机错误 。

措施/解决方案:

> 手机必须完全干燥 > 检查手机接头 > 检查供应管线



描述:

共振频率错误 。

措施/解决方案:

> 检查工作尖 (牢固连接? 损坏?) > 检查手机接头 > 检查供应管线



描述:

加热错误。

措施/解决方案:

> 检查冷却水最高温度 (30 °C) > 冷却水温度下降后错误自动消失



描述:

信息：加热错误 错误符号和导航牙交替显示

措施/解决方案:

> 不加热就开始运行是不可能的。



描述:

洁牙机超时。

措施/解决方案:

> 检查脚动控制 (不得无间断地连续处于活动状态15分钟以上)



描述:

信息：正在冲洗功能菜单中

措施/解决方案:



描述:

信息：正在清洁功能菜单中

措施/解决方案:



描述:

系统错误

措施/解决方案:

> 重启设备 > 请联系W&H授权维修伙伴

Display remains dark

描述:

显示屏一直黑屏

措施/解决方案:

> 重启设备

Device does not start

描述:

设备不能启动

措施/解决方案:

> 检查网电源线（没有接上或有问题）> 检查网电源电压（无电压或电压不正确）> 检查网电源开关（断开或有故障）> 检查熔断器（电源插口）